

August 17, 2015

Zubehör

ARN	Bezeichnung	Schraube	Drehmoment
ACC-EX-12300-00	Rohrklemmadapter lang, 34 mm, mit Pyramidenaufnahme	Justierschrauben	15Nm
		Zylinderschraube	15Nm
ACC-00-12500-00	Rohrklemmadapter, 30 mm, Pyramidenaufnahme	Justierschrauben	15Nm
		Zylinderschraube	7Nm
ACC-00-12600-00	Rohrklemmadapter, 30 mm, Pyramide	Zylinderschraube	7Nm
ACC-00-12700-00	Rohradapter mit Pyramidenaufnahme, 30 mm x 100 mm	Justierschrauben	15Nm
ACC-00-12800-00	Rohradapter mit Pyramidenaufnahme, 30 mm x 400 mm	Justierschrauben	15Nm
ACC-00-12900-00	Rohrklemmadapter, 34 mm, Pyramidenaufnahme	Justierschrauben	15Nm
		Zylinderschraube	15Nm
ACC-00-13200-00	Adapter mit Pyramidenaufnahme, 4-Loch Euro-Anschluss	Justierschrauben	15Nm
		Befestigungsschrauben	10Nm
ACC-00-13500-00	Adapter mit Pyramide und Drehjustierung, 4-Loch Euro-Anschluss	Befestigungsschrauben	10Nm
		Zylinderschraube	10Nm
ACC-00-13600-00	Adapter mit Pyramidenaufnahme und Drehjustierung, 4-Loch Euro-Anschluss	Justierschrauben	15Nm
		Befestigungsschrauben	10Nm
		Zylinderschraube	10Nm
ACC-00-13700-00	Adapter mit Pyramide und Drehjustierung, 4-Loch Euro-Anschluss	Befestigungsschrauben	10Nm
		Zylinderschraube	10Nm
ACC-00-13800-00	3-Arm Schaftadapter mit Pyramide und Drehjustierung	Zylinderschraube	10Nm
ACC-00-14000-00	Schraub-Adaption mit Pyramidenaufnahme für Drehjustierung	Justierschrauben	15Nm
ACC-00-17032-00	Doppeladapter mit Pyramidenaufnahme, 32 mm	Justierschrauben	15Nm
ACC-00-17045-00	Doppeladapter mit Pyramidenaufnahme, 45 mm	Justierschrauben	15Nm

ACC-00-17060-00	Doppeladapter mit Pyramidenaufnahme, 60 mm	Justierschrauben	15Nm
ACC-00-17075-00	Doppeladapter mit Pyramidenaufnahme, 75 mm	Justierschrauben	15Nm
ACC-00-19600-00	Rohrklemmadapter mit Pyramide für Silhouette LP	Zylinderschraube	15Nm
ACC-00-20000-00	Rohrklemmadapter 34 mm mit Ausgleich / Versatz	Justierschrauben Zylinderschraube	15Nm 15Nm
ACC-00-20201-00	Rohrklemmadapter 34 mm (heavy duty)	Justierschrauben Zylinderschraube	20Nm 12Nm

Füße

ARN	Bezeichnung	Schraube	Drehmoment
F10	Dynadapt	F10 Anschlussschraube	40 Nm & Loctite
F15	Agilix	M12 Anschlussschraube (Kat 1-9)	60-68 Nm & Loctite
FS1	Sierra 19-21 cm	M10 Anschlussschraube (Kat 1-6) M12 Anschlussschraube (Kat 7-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
	Sierra 22-31 cm	M10 Anschlussschraube (22-25) M12 Anschlussschraube (26-31)	55-60 Nm & Loctite 60- 68 Nm & Loctite
FS3	Defender 16-18 cm	M8 Anschlussschraube (Kat 1P-1A) M10 Anschlussschraube (Kat 2A-4A)	22-25 Nm & Loctite 55-60 Nm & Loctite
	Defender 19-21 cm	M8 Anschlussschraube (Kat 1P-1A) M10 Anschlussschraube (Kat 2A-4A)	22-25 Nm & Loctite 55-60 Nm & Loctite
FS3	Highlander 22-25 cm	M10 Anschlussschraube (Kat 1-6) M12 Anschlussschraube (Kat 7-9)	55-60 Nm & Loctite 60- 68 Nm & Loctite
	Highlander 26-28 cm	M10 Anschlussschraube (Kat 1-4) M12 Anschlussschraube (Kat 5-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
	Highlander 29-31 cm	M12 Anschlussschraube (Kat 1-9)	60-68 Nm & Loctite
FS3	Highlander MAX	M12 Anschlussschraube (Kat 10-13)	60-68 Nm & Loctite
FS4	Pacifica LP 22-25 cm	M8 Pyramid Schrauben (Kat 1-6) M10 Pyramid Schrauben (Kat 7-9)	20 Nm & Loctite 35 Nm & Loctite
	Pacifica LP 26-28 cm	M8 Pyramid Schrauben (Kat 1-4) M10 Pyramid Schrauben (Kat 5-9)	20 Nm & Loctite 35 Nm & Loctite
	Pacifica LP 29-31 cm	M10 Pyramid Schrauben (Kat 1-9)	35 Nm & Loctite
FS5	Thrive	M12 Anschlussschraube (Kat 1-9)	60-68 Nm & Loctite
FS6	Nitro	M10 Anschlussschraube (Kat 1-4) M12 Anschlussschraube (Kat 5-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68Nm & Loctite
FS9	Nitro LP	M10 Anschlussschraube (Kat 1-4) M12 Anschlussschraube (Kat 5-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
FX6/FX7	Katapult	M12 Anschlussschraube	60-68 Nm & Loctite

LP2	LP Symes	M10 Schrauben	35 Nm
LP2-W2	Freestyle Swim	M10 Schrauben	35 Nm & Loctite
R11	Renegade AT Mold 22-31 cm	M12 Anschlussschraube	60-68 Nm & Loctite
R16	Renegade LP-AT 22-25 cm	M10 Anschlussschraube (Kat 1-6) M12 Anschlussschraube (Kat 7-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
	Renegade LP-AT 26-28 cm	M10 Anschlussschraube (Kat 1-4) M12 Anschlussschraube (Kat 5-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
	Renegade LP-AT) 29-31 cm	M12 Anschlussschraube (Kat 1-9)	60-68 Nm & Loctite
ROM	Kinterra	ROM Plattform Bolt (M8)	23 Nm & Loctite
RS1	Renegade 19-21 cm (ohne abgespreizte Großzehe)	M10 Anschlussschraube (Kat 1-6) M12 Anschlussschraube (Kat 7-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
	Renegade Mold 22-31 cm (mit und ohne abgespreizte Großzehe)	M10 Anschlussschraube (22-25) M12 Anschlussschraube (26-31)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
RS2-P1	Runway Push Druckknopf	Schlitten Schrauben (Kat 1-6)	23 Nm & Loctite
RS2-K1	Runway HX	Schlitten Schrauben (Kat 1-6)	23 Nm & Loctite
RS6	Renegade LP 22-25 cm (mit und ohne abgespreizte Großzehe)	M10 Anschlussschraube (Kat 1-6) M12 Anschlussschraube (Kat 7-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
	Renegade LP 26-28 cm (mit und ohne abgespreizte Großzehe)	M10 Anschlussschraube (Kat 1-4) M12 Anschlussschraube (Kat 5-9)	55-60 Nm & Loctite 60-68 Nm & Loctite
	Renegade LP 29-31 cm (ohne abgespreizte Großzehe)	M12 Anschlussschraube (Kat 1-9)	60-68 Nm & Loctite
SKI	Slalom Ski Foot	M12 Cup Schrauben M8 Toe Schrauben	60-68 Nm & Loctite 35-40 Nm & Loctite
VS1	Senator	M10 Anschlussschraube (Kat 1-6)	55-60 Nm & Loctite
VS2	Promenade	M10 Anschlussschraube (Kat 1-5)	55-60 Nm & Loctite