


# Sicherheit. Komfort. Dynamik.

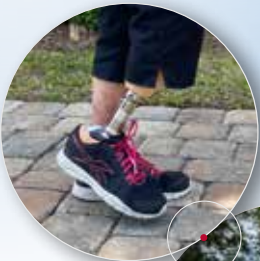

K<sub>1</sub> + K<sub>2</sub>




Der **Restore™ Fuß** ist ein Durchbruch für die Versorgung von Anwendern der Mobilitätsklassen Mob 1 und Mob 2. Durch das C-förmige Design der durchgängigen und nicht durchgeschraubten Glasfaserfeder bietet der Restore ausgezeichnete Stabilität und einen hohen Tragekomfort. Anwender gewinnen mehr Sicherheit bei ihren Alltagsaktivitäten. Die Langlebigkeit des Materials, die ideale Adaption an den Untergrund sowie die individuelle Anpassbarkeit der Fersenhärte ermöglichen ein optimales Versorgungsergebnis.

## Produkt-Eigenschaften

- **Sanfte Abrollung:** Die durchgehende, nicht durchgeschraubte Glasfaserfeder bietet Mob 1- und Mob 2-Anwendern die erforderliche Stabilität und ein sanftes Abrollverhalten.
- **Einstellbare Ferse:** Drei unabhängige Fersendämpfer ermöglichen dem Orthopädie-Techniker eine maximale individuelle Anpassbarkeit an die Ansprüche und Bedürfnisse des Anwenders.
- **Inversion/Eversion:** Die teilweise geteilte Vorfußfeder und die Flexibilität von Fiberglas ermöglichen auch die Anpassung an unebenes Gelände.
- **C-förmiges Fußmodul:** Die C-Form bietet eine verbesserte Performance und Stabilität vom Fersenkontakt bis zum Zehenabstoß.

## Restore™ Spezifikationen

- Größen: 22 cm - 30 cm
- Abgespreizte Großzehe: 23 cm - 28 cm
- Maximales Anwendergewicht: 136 kg
- Aufbauhöhe: 89 mm - 99 mm
- Durchschnittliches Produktgewicht: 674 g (inkl. Fußkosmetik)
- Garantie: 12 Monate auf das Fußmodul (6 Monate auf die Fußkosmetik)
- Wasserfest: für den sicheren Kontakt mit Wasser (Untertauchen ins Wasser) konstruiert
- Erhöhte Haltbarkeit, Flexibilität und ein natürliches Gefühl

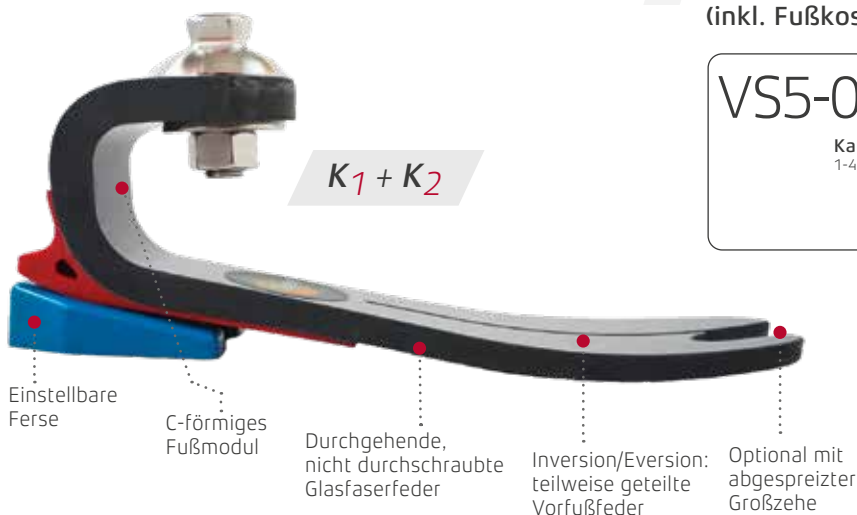

## Auswählen und Bestellen

### 1 Anwenderdaten


- Anwendergewicht (kg)
- Fußgröße (22 - 30 cm)
- Rechts oder Links
- Abgespreizte Großzehe\* oder Standardausführung

\*Verfügbare Sandalenzeh-Größen: 23 - 28 cm

### 2 Auswahl der Federkategorie

Gewicht (kg)	Belastungsgrad
45-59	1
60-81	2
82-109	3
110-136	4

### 3 Ergänzen der Prothesenfuß-Bestellnummer (inkl. Fußkosmetik)

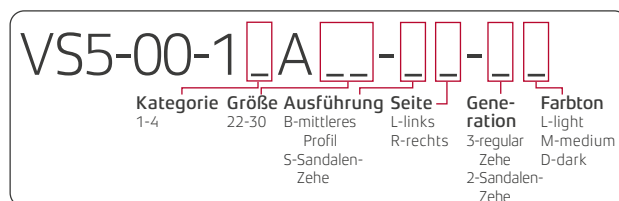

## Fokussierte Lösungen

Freedom Innovations ist ausschließlich auf die Entwicklung von Spitzentechnologien für Menschen mit Beinamputationen fokussiert. Alle Entwicklungen entstehen dabei in der engen Zusammenarbeit mit Amputierten und Orthopädietechnikern. Für eine optimale Anwenderzufriedenheit bieten wir neben unseren technologischen Innovationen Schulungen, Trainings und Support durch unsere Techniker an.

[www.freedom-innovations.eu](http://www.freedom-innovations.eu)

**Freedom Innovations Europe B.V.**  
Europäische Zentrale (deutschsprachig)

Jaargetijdenweg 4  
7532 SX Enschede  
Niederlande  
Kostenlose Servicenummer: 00800-2806 2806  
Tel.: +31 (0) 53 20 30 300  
Fax: +31 (0) 53 20 30 305  
[info@freedom-innovations.eu](mailto:info@freedom-innovations.eu)  
[www.freedom-innovations.eu](http://www.freedom-innovations.eu)

**Weltweite Firmenzentrale**

3 Morgan  
Irvine, CA 92618  
U.S.A.  
Kostenlose Servicenummer: +1 888 818 6777  
Tel.: +1 949 672 0032  
Fax: +1 949 672 0084

