

Silhouette® LP Notice

Référence: RS5


Assemblage

Le module de pied Silhouette® LP se compose d'un pied en matériaux composites à base de carbone, d'une semelle, d'une chaussette en Spectra™, d'un adaptateur tubulaire et d'une enveloppe esthétique. Le Silhouette® LP utilise un adaptateur tubulaire muni d'une connexion male ou femelle pour se connecter à d'autres composants prothétiques. Lors de l'installation de l'adaptateur tubulaire, s'assurer que le pilon est complètement inséré dans le manchon en plastique noir avant de serrer le collier. L'adaptateur tubulaire doit toujours être installé avec le boulon en position postérieure. Si la hauteur doit être ajustée après que le pilon soit coupé, l'option Versa-Clamp (AC-123L) doit être utilisée avec les bagues de hauteur appropriées. Un jeu de coins talonniers en mousse est fourni pour augmenter la rigidité du talon. Après l'alignement dynamique, serrer les vis de la pyramide en suivant les recommandations du fabricant. Fixer les vis à l'aide d'un frein filet (Loctite 242).

Banc d'alignement

Pré-installation de la prothèse:

- Aligner le module de pied en flexion-plantaire/flexion-dorsale en tenant compte de la hauteur du talon de la chaussure.
- Aligner l'emboîture en adduction/abduction afin d'assurer un angle approprié par rapport au plan frontal.
- Aligner l'emboîture en flexion/extension afin d'assurer un angle approprié par rapport au plan sagittal.
- Ajuster la position de l'emboîture de façon à ce que la ligne de charge soit située antérieurement par rapport au pilon (voir illustration)

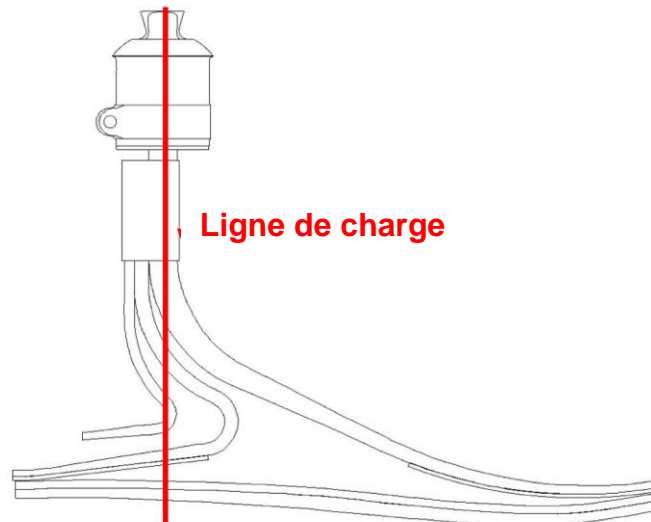

Alignement dynamique

Lors de la *phase d'attaque*, la semelle et le talon emmagasinent de l'énergie qu'ils restituent au milieu de la *phase d'appui*. Cette propriété crée l'impulsion qui permet à l'avant-pied d'accumuler de l'énergie et de la restituer lors du *passage du pas*.

Pour optimiser le déroulement allant du talon vers l'avant-pied, ajuster les variables suivantes :

- Position du pied dans le plan antérieur/postérieur
- Flexion-plantaire/flexion-dorsale
- Souplesse du talon

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Diagnostic | Le talon est trop souple | <p><i>Symptômes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • La flexion plantaire est trop rapide • L'avant pied est excessivement rigide • Le genou est sollicité en hyper-extension <p><i>Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opérer une translation antérieure de l'emboiture par rapport au pied • Installer un <i>coin talonnier</i> | | | | | | | | |
| | Le talon est trop rigide | <p><i>Symptômes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexion du genou trop rapide, instabilité • Le transfert talon-pointe est trop rapide • La restitution d'énergie est quasi inexistante <p><i>Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Décaler l'emboiture postérieurement par rapport au pied • Vérifier la sélection de la catégorie du pied | | | | | | | | |
| | Module de pied trop rigide | <p><i>Symptômes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • interruption au milieu du déroulement de la marche à vitesse réduite <p><i>Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Considérer un pied de moindre catégorie | | | | | | | | |
| | Module de pied trop souple | <p><i>Symptômes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Clappement/bruit lors du <i>contact initial</i> • Déflexion excessive de l'avant-pied lors d'impact à haute intensité <p><i>Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Considérer un pied de plus haute catégorie | | | | | | | | |
| Coin talonnier | <p>Un jeu de <i>coins talonniers</i> est inclus afin d'ajuster la rigidité du talon lors de la <i>phase d'attaque</i>. Le coin sélectionné peut être installé entre les lames du talon de façon temporaire en plaçant à l'aide de ruban adhésif double face. Pour une installation permanente, coller le coin en utilisant de la colle-contact ou un produit similaire.</p> | | | | | | | | | |
| Chaussette Spectra™ | <p>Un chaussette en Spectra™ est incluse afin de protéger l'enveloppe esthétique et de minimiser les bruits. La chaussette Spectra™ doit être remplacée à intervalle régulier dépendant du niveau d'activité du patient. Omettre d'inspecter et de remplacer la chaussette Spectra™ cause une usure prématurée du module de pied et annule la garantie.</p> | | | | | | | | | |
| Enveloppe esthétique | <p>Pour installer et retirer l'enveloppe esthétique, utiliser le chaussepied (ACC-00-10200-00) pour ne pas abimer le module de pied.</p> | | | | | | | | | |
| Pied Silhouette® LP | Hauteur minimum: | <table border="0"> <tr> <td>Taille</td> <td>Hauteur</td> </tr> <tr> <td>22-25 cm</td> <td>168 mm</td> </tr> <tr> <td>26-28 cm</td> <td>181 mm</td> </tr> <tr> <td>29-31 cm</td> <td>191 mm</td> </tr> </table> | Taille | Hauteur | 22-25 cm | 168 mm | 26-28 cm | 181 mm | 29-31 cm | 191 mm |
| Taille | Hauteur | | | | | | | | | |
| 22-25 cm | 168 mm | | | | | | | | | |
| 26-28 cm | 181 mm | | | | | | | | | |
| 29-31 cm | 191 mm | | | | | | | | | |
| Données techniques | Poids maximum du patient: | 166 kg (365 lbs) | | | | | | | | |
| | Tailles disponibles : | 22cm-30cm (31cm commande spéciale) | | | | | | | | |
| | Hauteur de talon: | 10mm | | | | | | | | |
| | Garantie: | Composants en carbone et connecteur (36 mois) Enveloppe esthétique (6 mois) | | | | | | | | |

Maintenance

Le module de pied nécessite une maintenance régulière.

- Inspecter le module de pied tous les six mois. Des inspections à intervalles plus rapprochés sont nécessaires si l'utilisateur est plus actif. Remplacer la chaussette Spectra™ et/ou l'enveloppe esthétique en cas d'usure pour éviter la détérioration des composants en fibre de carbone.
- Le module de pied peut être nettoyé et désinfecté à l'eau et au savon.
- Ne jamais utiliser le module de pied si des éléments abrasifs sont présents dans l'enveloppe esthétique. Retirer immédiatement le module de pied et rincer abondamment à l'eau. La présence d'éléments abrasifs entraîne l'usure prématurée des composants en fibre de carbone.

Mise en garde

Ignorer les directives de *l'instruction d'utilisation* annule la garantie.

- Ne jamais installer le Silhouette® LP si le manchon logé dans l'adaptateur dépasse du collier.
- Installer l'adaptateur tubulaire autrement qu'avec le boulon en position postérieure peut causer la défaillance du produit et entraîner des blessures graves.
- Ne jamais utiliser le module de pied sans *enveloppe esthétique*.
- Ne jamais installer le produit avec la semelle à l'intérieur de la même chaussette Spectra™ destinée au module Silhouette® LP. Utiliser ce produit contrairement entraîne l'usure prématurée du module de pied.
- Ne jamais utiliser le Silhouette® LP sans sa *semelle*. La semelle joue un rôle dans la fonction du module. Elle crée un pont entre le talon et l'avant pied et élimine les risques de blessures.
- Les produits de Freedom Innovations sont conçus pour être compatibles avec les adaptateurs et connecteurs standards.
- Les produits de Freedom Innovations sont fabriqués et testés pour un poids et un niveau de motricité spécifique. L'utilisation de ce produit par un patient autre que celui à qui il est destiné est dangereuse, et décharge Freedom Innovations de toutes responsabilités, rendant irrecevable toute demande en termes de garantie, dommages et intérêts. Le prothésiste est responsable de la sélection et de la fabrication appropriée des autres composants utilisés avec ce produit.



Jaargetijdenweg 4
7532 SX Enschede
The Netherlands
Toll Free 00800 – 2806 2806
FAX +31 (0)53 – 20 30 305
Email: info@freedom-innovations.eu

