



# FREEDOM KINNEX™

المعالجات الدقيقة لأنظمة الكاحل / القدم

تواصل مع قدم اخترقت كل المقاييس في عالم التكنولوجيا

## الوقوف بثبات، الاتصال الوثيق

إن معالج Kinnex™ يقدم أسرع استجابة للكاحل في العالم للتكيف الفوري مع زاوية وطبيعة سطح الأرض. بالإضافة إلى قدم من ألياف الكربون لتزويد المستخدمين بتجربة فريدة لمشي مستقر وطبيعي سواءً على أرض مستوية أو مائلة أو كانت على نحو سلس أو متعرج، سيتمتع المستخدمون بالثقة المتزايدة التي تنبع من الوقوف بثبات والشعور بالاتصال معها في كل خطوة في كل البيئات الرطبة والجافة!

### تحسين التنقل

- مشية أكثر طبيعية
- استقرار على المنحدرات
- حركة طبيعية

1 تقنية الاستجابة السريعة™ RapidResponse للصلام الالكتروني  
تتكيف فوراً ومن الخطوة الأولى للتغير في ميلان سطح الأرض

2 حساسات التحكم بحركة الكاحل عن طريق أجهزة الاستشعار الفورية  
تضبط الصلابة والدوران للكاحل مرتكزة على طبيعة الأرض بكل خطوة تخطيها على حدا

3 الارتباط بمفصل الكاحل بزاوية 30 درجة  
إن مفصل الكاحل القابل للتحرك يخلق ليونة أو ,,انثناء" تسمح للكاحل والقدم أن يكونوا في الوضع المثالي بالنسبة لسطح المشي.

4 القفل الديناميكي  
إن ميزة القفل الديناميكي المتطورة توفر للمستخدم أساس متين من الاستقرار عند الوقوف في المكان بدون تحرك الكاحل إلى الأمام أو الخلف

5 إعدادات المستخدم - التكنولوجيا المتطورة أو اليدوية  
باستخدام تطبيق الهاتف يمكن للمستخدم مراقبة حالة البطارية، وتغيير ارتفاعات الكعب للأحذية المختلفة و تخزين إعدادات الأحذية وإجراء تعديلات طفيفة لراحة أكثر أثناء المشي.

6 وضع مساعد اللبس  
عند تفعيل وضع مساعد اللبس للكاحل سوف يتم قفل زاوية الكاحل على أقصى زاوية انثناء الكاحل نحو الأسفل مما يساعد المستخدم لتبديل ملابسه (بنطاله) أو حذائه بشكل أسهل.

7 القفل اليدوي  
إن ميزة القفل مريحة لأنها تتيح للمستخدمين قفل الكاحل بسرعة وبسهولة عند الحاجة.

8 ألياف الكربون ل Freedom  
ثبت سريياً أن استعمال تكنولوجيا ألياف الكربون هو الأفضل على صعيد الطاقة المرتفعة، فاستخدامه مهم للوصول إلى أفضل أداء





## دليل الاختيار للمريض

### اختيار مدى الصلابة

مستوى النشاط		الوزن بالكيلوغرام
منخفض	متوسط	
1	1	44-52
2	1	53-59
3	2	60-68
4	3	69-77
5	4	78-88
6	5	89-100
7	6	101-116
	7	117-125

2

### التحقق من قياس المستخدم

1

- وزن المريض
- قياس القدم (24-30cm)
- ارتفاع القدم (انظر الرسم البياني للطول)
- يمين أو يسار
- قدم صندل\* / قدم اعتيادية

ارتفاع القدم	قياس القدم
184 mm	24-25 cm
186 mm	26-28 cm
187 mm	29-30 cm

\* أقدام الصنادل المتوافرة: 24-28 cm

### املاً الفراغ بالرقم المطلوب لطلب القدم (مضمنة الغلاف التجميلي)

3

F14-00-1  A  -  -  -

لون البشرة ل الفاتح  
3 للقدم العادية  
2 للقدم الصندل  
D للغامق

الجهة L لليساار  
R لليمين

الإصدار K للقدم الاعتيادية  
S للقدم الصندل

القياس سم 24-30

الفئة 1-7

#### الرقم المطلوب لطلب القدم

F14-00-0  A  -

لون البشرة ل الفاتح  
M للوسط  
D للغامق

الجهة UR للقدم الاعتيادية، عالمي  
LS للقدم الصندل، يسار  
RS للقدم الصندل، يمين

القياس سم 24-30

الفئة 1-7

#### الرقم المطلوب لطلب غلاف القدم

FTC-  K-1  -  -

لون البشرة ل الفاتح  
M للوسط  
D للغامق

الجهة L لليساار  
R قياسي  
S-صندل  
R لليمين

القياس سم 24-30

نوع الغلاف  
2 للقدم الصندل  
3 غلاف مرتفع الطول

المكتب الرئيسي في أوروبا

www.freedom-innovations.eu  
هولندا +31 (0) 53 20 30 300  
info@freedom-innovations.eu